



求救按钮

—— 安装调试使用说明 ——

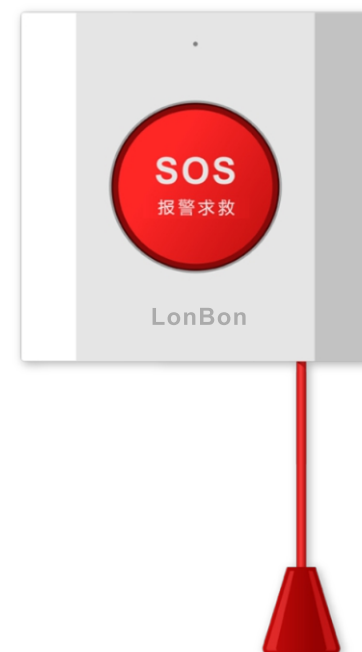

一、安装调试

安装在长者床头和洗手间马桶对面的墙壁上；支持一键报警求救及定位。也可安装在走廊、凉亭等公共区域，离地面1.2米墙壁上。在此区域，求救按钮和监护手表报警时，监护主机可接收到报警及位置信息。求救按钮内置的定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年，独特的防水设计，即使在潮湿环境中也可长久工作。

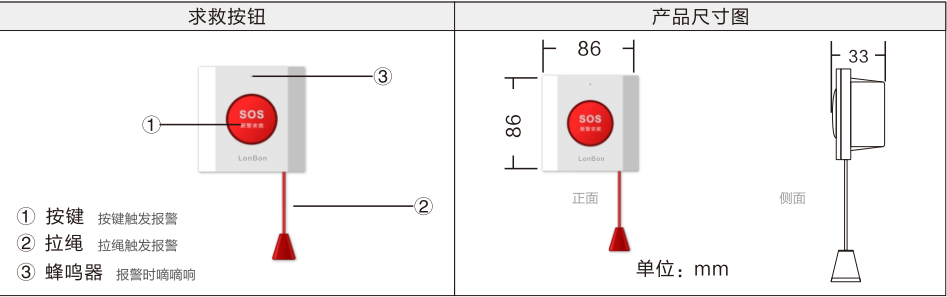

1、产品安装图



二、使用说明

1、设备使用

求救按钮面壳与主体合紧后，听到“滴、滴..”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救：听到“滴、滴..”慢响表示正在报警中，“滴滴、滴滴”表示报警成功，“滴滴滴、滴滴滴”表示报警失败，按钮报警失败将会再次自动报警，无需手动干预。

2、设备绑定

(1) 公共区域设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“机构养老/社区养老”App，进入“公共区域设备绑定”界面，在“公共区域定位按钮”栏，输入公共区域名称和所属主机号，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该求救

按钮，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。（详情查看“机构养老/社区养老”App）

(2) 房间设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“机构养老/社区养老”App，进入“设备安装-设备绑定-房间设备绑定”界面，完成“房间信息录入”后，在洗手间求救按钮位置-栏，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该求救按钮，点击App上“绑定”按钮，根据App.上提示完成绑定。（详情查看“机构养老/社区养老”App）

三、技术参数

产品名称：	求救按钮	电池类型：	2节5号干电池
续航时间：	>6年	存储容量：	RAM-32KB、ROM-256KB
防水等级：	IPX8	工作湿度：	10%~99%
工作温度：	-10℃~+55℃	通讯网络：	中国电信
通讯方式：	NB-IoT、蓝牙	产品材质：	ABS+PC