

监护手表

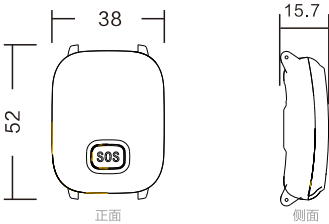
—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

实时监测长者生命安全，支持自动和手动报警求救，报警后支持多种定位方式（定位信标/GPS/AGPS/LBS等）。采用独特的防水设计，工作时长7天。

监护手表	产品尺寸图
 ① 信号强度 ② 电池电量 ③ 时间日期 ④ SOS按键 ⑤ 充电接口	 产品尺寸图（单位：mm）

二、使用说明

1、设备使用

- (1) 开 机：长按2秒SOS按键，手表开机。
- (2) 报警求救：长按2秒SOS按键可手动报警求救。
- (3) 界面切换：短按SOS按键切换界面。
- (4) 心率测量：佩戴长者保持静止状态，等待心率测量完成。
- (5) 活动计步：记录当天截止到查看时所运动的步数。
- (6) 磁吸充电：将充电线磁吸在手表背部金属点上，吸附后自动充电。
- (7) 关 机：在6秒内，连续按下SOS按键15次，手表关机。
- (8) 防水设计：手表具备IP68防尘防水等级，即使冲水也能正常使用。

2、手表绑定

打开“机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者设备绑定”界面，选择一位需要绑定设备的长者，在设备信息中选择“监护手表”，点击“去绑定”，然后扫描手表二维码，将自动完成绑定并保存，完成绑定后手表二维码界面会显示绑定长者的姓名。

3、注意事项

因设备属于电子产品，切勿佩戴进入强磁场场所，如核磁共振室等，以免造成产品损坏。

三、技术参数

产品名称：	监护手表	电池类型：	锂电池（570mAh）
工作时长：	7天	存储容量：	RAM-64KB、ROM-512KB
防水等级：	IP68	工作湿度：	10%~99%
工作温度：	-10℃~+60℃	充电时间：	2H左右
充电方式：	磁吸式	通讯网络：	中国电信
通讯方式：	NB-IoT、蓝牙	显示屏：	0.95英寸（96X64像素）
产品材质：	ABS+PC	产品尺寸：	38mm*52.2mm*15mm