

监护手表

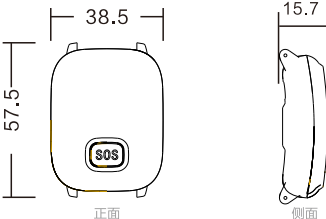
—— 安装调试使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

实时监测长者安全，支持自动和手动报警功能，报警后支持多种定位方式（信标/北斗/GPS/LBS/WiFi等）。支持来电语音播报，自动接通对话。采用防水设计，磁吸式充电，工作时长达3天。

监护手表	产品尺寸图
 ① 信号强度 ② 日期时间 ③ 喇叭 ④ 咪头 ⑤ 充电接口 ⑥ 电池电量 ⑦ SIM卡塞 ⑧ SOS按键	 正面 侧面 产品尺寸图（单位：mm）

二、使用说明

1、设备使用

- (1) 开 机：长按2秒SOS按键，手表开机。
- (2) 报警求救：长按2秒SOS按键可手动报警求救。
- (3) 界面切换：短按SOS按键切换界面，同时伴有语音播报。
- (4) 语音通话：短按SOS按键可接听来电，并进行语音通话。
- (5) 心率测量：佩戴长者保持静止状态，等待心率测量完成。
- (6) 活动计步：记录当天截止到查看时所运动的步数。
- (7) 磁吸充电：将充电线磁吸在手表背部金属点上，吸附后自动充电。
- (8) 关 机：在6秒内，连续按下SOS按键15次，手表关机。
- (9) 防水设计：手表具备IP67防尘防水等级，即使冲水也能正常使用。

2、手表绑定

打开“机构养老App”，在“设备安装-设备绑定-长者设备绑定”界面，选择一位需要绑定设备的长者，在设备信息中选择“监护手表”，点击“去绑定”，然后扫描手表二维码，点击确定后将自动绑定并保存。完成绑定后手表二维码界面会显示绑定长者的姓名。

3、注意事项

- (1) 消费者若使用电源适配器充电，则应购买使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器。
- (2) 因设备属于电子产品，切勿佩戴进入强磁场场所，如核磁共振室等，以免造成产品损坏。

三、技术参数

产品名称：	监护手表	电池类型：	锂电池（570mAH）
工作时长：	3天	存储容量：	RAM-256kB、ROM-1MB
防水等级：	IP67	工作湿度：	10%~99%
工作温度：	0℃~+60℃	充电时间：	2H左右
充电方式：	磁吸式充电	通信方式：	4G Cat1、蓝牙
显示屏尺寸：	0.95英寸	产品尺寸：	50.5x38.5x17mm
产品材质：	ABS+PC	定位方式：	定位信标、北斗、GPS、AGPS、LBS、WiFi