

跌倒报警胸牌

—— 安装调试使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试


长者挂脖佩戴，支持自动和手动报警求救，报警后支持多种定位方式（定位信标、北斗、GPS、AGPS、LBS、WiFi等）。工作时长4天。

跌倒报警胸牌

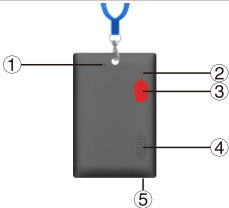

① 气压孔 ④ 喇叭孔
② 指示灯 ⑤ 充电口
③ 按键

产品尺寸图

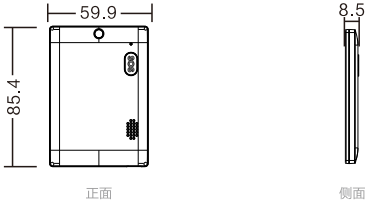

正面 侧面

单位：mm

二、使用说明

1、设备使用

- (1) 如何开机：按住 SOS 按键 2 秒，振动后听到“正在注册”语音提醒，表示开机成功。
- (2) 如何报警：按住 SOS 按键 2 秒，振动后听到“正在报警”、“报警成功”提示声，表示报警成功。
- (3) 低电提醒：电量不足时，每隔2小时语音播报，“电量过低，请及时充电”。
- (4) 如何充电：将Type-c充电线插入下方充电口，进行充电。
- (5) 如何关机：在 6 秒内，连续按下 SOS 按键 15 次，跌倒报警胸牌将自动关机。

2、跌倒报警胸牌绑定

打开并登录来邦机构养老App，在“长者管理”中选择需要绑定的长者或通过输入长者姓名、居住房号查找到长者，然后在长者的“当前佩戴设备”中勾选跌倒报警胸牌，点击“去绑定”按钮，进入绑定界面，再点击“绑定”按钮。当扫描到跌倒报警胸牌时，点击“保存并提交”按钮，若有“跌倒报警胸牌绑定成功”提示，表示绑定成功。

三、技术参数

产品名称：	跌倒报警胸牌	电池容量：	550mAH
工作时长：	4天	存储容量：	RAM-256kb、ROM-1M
工作温度：	0℃-+55℃	工作湿度：	10%-99%
存储温度：	-10℃ ~ +55℃	充电方式：	Type-C充电
充电时间：	2H左右	产品尺寸：	85x57x8mm（不含挂绳）
皮套尺寸：	97x78mm	通信网络：	中国移动
通信方式：	4G Cat1、蓝牙	产品材质：	ABS
定位方式：	定位信标、北斗、GPS、AGPS、LBS、WiFi		