


床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



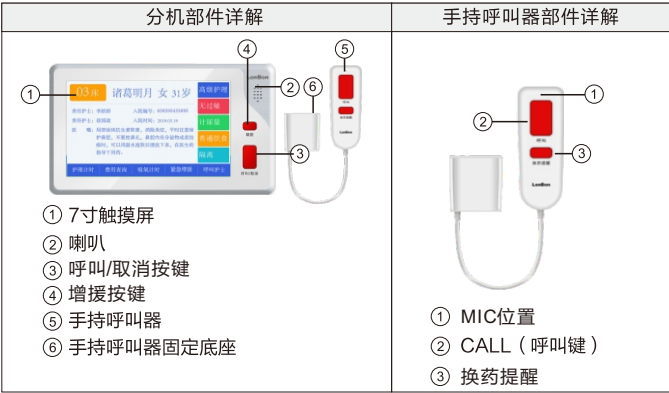

一、安装调试：

1、产品安装图：

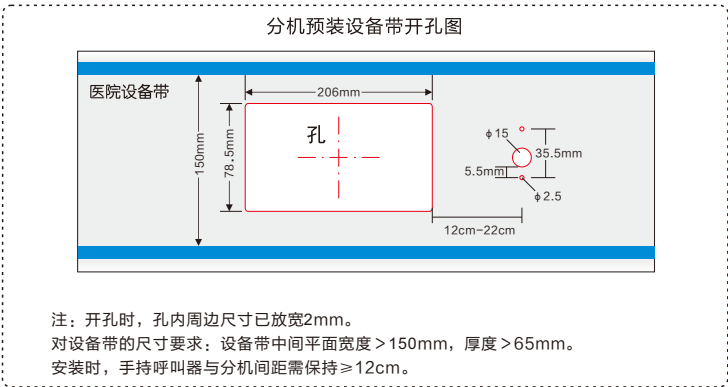

2、背面接口说明：

(1) 总线接口：

- ① 与模拟门口机（NBN-BM）连接时：将分机背后的1、2、3接口对应并连接到模拟病房门口机的接分机1、2、3总线上。
- ② 与模数病房门口机（NN-B10A/B10B）连接时：将分机背后的1、2、3接口对应并连到模数门口机的1、2、3总线上。
- ③ 与模数转换器（NNV-AD）连接时，将分机背后的1、2、3接口对应并连接到模数转换器的接分机的1、2、3总线上。

(2) 门灯接口：将分机的门灯电源、门灯控制、地线分别对应接在门灯的黄红黑(NBW-ME)或红白黑(NBW-ME5)。

(3) 外接防水按钮：

- ① 接ANW4时，按钮的红、白、黑线分别对应接在分机的报警输出、报警按钮、地线上。
- ② 接ANW3时，按钮连接线不分极性，接在防水按钮和地线上。
- (4) 扩展接口：将按钮接线盒（AN-K）的电源、信号、地线分别对应接在分机的扩展电源、扩展总线、地线。
- (5) 手持接口：将手持线上的端子与“外接手持”接口连接，连接时需注意端子方向。（连接后即可通过手持与主机进行呼叫对讲）。

二、设置调试：

分机使用前需先按对应床号编辑分机地址。

例：将分机设置成5号分机。

将设备通电后，主机需进入“系统设置”菜单，选择“编码设置”项，准备给分机编码。此时按住分机的“呼叫/解除”按键约5秒，此时主机会收到分机的编码请求，此时按下5号路选按键，当主机提示“已对码”，即编码成功。编码结束后，主机退出编码界面会再次对所有分机进行检测。

三、使用说明：

- 1、电子床头卡功能：分机屏幕具备电子床头卡功能，在屏幕上可以查看床号、患者信息、病情、医嘱、住院编号、护理标识等，所有信息来源于HIS，可根据数据库自动更新，无需手动维护。
- 2、入院须知：信息来源同步HIS，点击可查看入院后的注意事项，患者可自己查看避免护士口述，减少护士工作量。
- 3、费用查询：信息来源同步HIS，患者可查询入院后的费用清单。
- 4、护理计时：此功能由医护人员使用，触发时启动计时功能，再次触发结束计时功能，记录会保存至本机，如系统内设置了录音录像管理服务器则会同步上传至服务器保存。
- 5、请求增援：是一种高级别的呼叫，一般由医护人员使用。触发“请求增援”按键后，护士站主机播报“xx床请求增援”，其他医护人员听到后需立即前往帮助。（如需了解情况，可点击对应的分机按键与之对讲。）
- 6、呼叫护士：手持和分机面板上都有呼叫护士的按键，方便患者使用。触发后即可呼叫到护士站主机，主机接听即可双向通话。
- 7、换药提醒：这是一个有针对性的报警提示，区别于呼叫和请求增援。当触发“换药提醒”按键后，护士站主机播报“xx床换药提醒”。听到播报后护士即知道这个床的患者需要换药。
- 8、接收广播：分机可接收护士站主机发布的MP3广播和喊话广播。

