

防水按钮

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

防水按钮(总线制)

一、安装调试：

1、产品安装图：

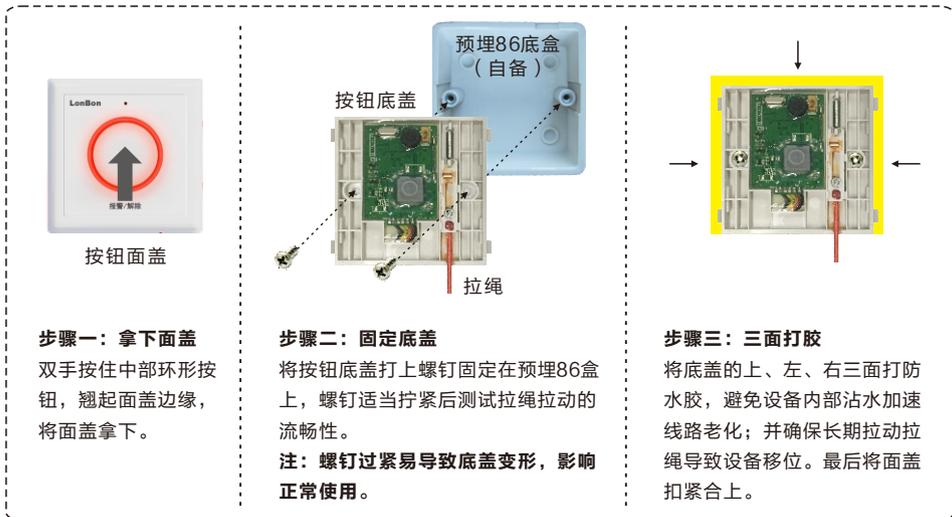

按钮面盖

步骤一：拿下面盖
双手按住中部环形按钮，翘起面盖边缘，将面盖拿下。

按钮底盖

预埋86底盒 (自备)

拉绳

步骤二：固定底盖
将按钮底盖打上螺钉固定在预埋86底盒上，螺钉适当拧紧后测试拉绳拉动的流畅性。
注：螺钉过紧易导致底盖变形，影响正常使用。

步骤三：三面打胶
将底盖的上、左、右三面防水胶，避免设备内部沾水加速线路老化；并确保长期拉动拉绳导致设备移位。最后将面盖扣紧合上。


注意事项：

- (1) 安装位置不宜选择可能被水直接冲刷的地方。
- (2) 最佳安装高度1米，保证摔倒后能够得着拉绳。

2、接线说明（如右图）：

- (1) 与模数病房门口机连接时，将按钮背后的白、黑、黄三芯线对应并联到模数病房门口机的1、2、3总线上。
- (2) 如配有门灯，将三色门灯上的黄、红、黑三芯引线对应并接到按钮的黄、红、黑三芯引线上。

注：当按钮附近有大功率设备时，为了提高系统稳定性和抗干扰能力，建议门口机到按钮端的总线采用三芯屏蔽线，并将屏蔽层一端接地。

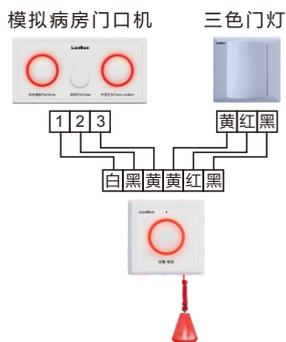

二、设置调试：

1、在线编码设置（例：将防水按钮编码成5号设备）

将按钮与总线连接后，点击主机上的“系统设置”键，选择“在线分机编码设置”选项，按住按钮上的“报警/解除”键至报警指示灯常亮松开，选定主机上的第5路路选按键，路选按键显示“已对码”，并提示编码成功，按上述方法将所有防水按钮依次编码。

三、使用说明：

按一下按钮上的“报警/解除”键或拉一下拉绳，按钮会发出报警提示音，主机触摸屏上相应的路选分机键呈红色闪亮并显示“呼叫中...”，同时伴有语音播报及音乐提示声，同时该病房外的门灯闪亮；如需解除该报警，需长按按钮上的“报警/解除”键约3秒，当听到有“滴”一声提示及指示灯灭时松开即可。