


# 床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



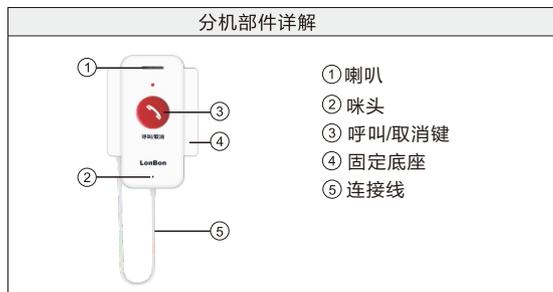

## 一、安装调试:

### 1、产品安装图:

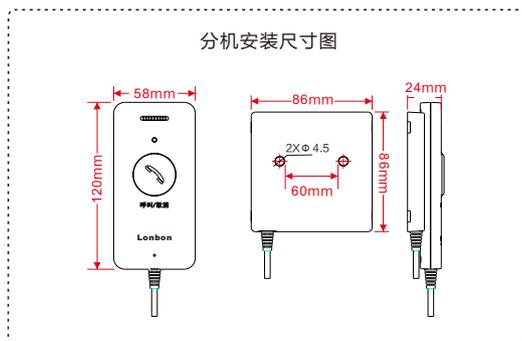

### 2、背面接口说明:

#### (1) 总线接口:

与模数转换器 (NNV-AD) 连接时, 将分机背后的绿、黑、红三芯线对应并并联到模数转换器的接分机的1、

2、3总线上。

**注:** 为了提高系统稳定性和抗干扰能力, 建议模数转换器到分机端的总线采用三芯屏蔽线。线材耐温需在105℃。

分机安装完毕后, 要将总线屏蔽层全部连通, 中间不要出现断层, 并将屏蔽层头或尾接大地。

## 二、设置调试:

分机使用前需先按对应床号编辑分机地址。

例: 将分机设置成5号分机。

将一台分机或多台分机与模数转换器相连后, 通电后进入开机自检状态。待自检完毕, 点击主机(或病房门

口机)上的“系统设置”菜单, 选择“在线分机编码设置”项, 准备给分机编码。请按住分机的“呼叫/解除”键至分机指示灯常亮, 再松开; 此时主机(或模数病房门口机)会收到分机编码请求(左下角出现红色闪烁), 然后选择5号路选分机键按下, 当主机提示“已对码”, 红色闪烁消失, 即编码成功。

按上述方法将所有分机依次编码。当编完分机号码后, 按分机的“呼叫/解除”键呼叫主机, 以确认分机的编号。

## 三、使用说明:

### 1、分机呼叫主机及对讲:

按下分机面板上的“呼叫/取消”键, 分机上的呼叫指示灯快速闪亮, 主机上相应的路选分机键和该病房门口机上相应的病床号同时呈红色闪亮, 并伴有语音播报, 同时该病房门外的门灯亮; 待主机选定该路选分机键后分机上的呼叫和对讲指示灯常亮; 主机方可以免提、手柄二种方式与分机双工对讲, 或以TALK键与分机双向对讲(按下TALK键可讲话, 松开TALK键可听分机讲话)。

**注:** 如主机呼叫该分机, 分机端的双工指示灯常亮, 可与主机双向对讲。

### 2、解除呼叫:

分机如已呼出, 若需解除呼叫, 只需再次按下“呼叫/取消”键。