

# 产品接线使用说明

产品名称：三色门灯



## 一、引线说明：

将三色门灯上的黄、红、黑三芯引线对应与病房门口机连接：  
与IP网络病房门口机或模数病房门口机的“电源输出、门灯控制、地线”相连。  
与模拟病房门口机的“电源(红线)、门灯(粉线)、地线(黑线)”相连。

## 二、使用说明：

病房外的门灯闪亮方式如下：

- ① 普通呼叫时，该病房外的门灯闪亮红色。
  - ② 高级呼叫时，该病房外的门灯闪亮蓝色。
  - ③ 特护呼叫时，该病房外的门灯闪亮绿色。
  - ④ 输液报警时，该病房外的门灯呈红蓝交替闪亮。
  - ⑤ 卫生间报警时，该病房外的门灯呈红绿交替闪亮。
  - ⑥ 按下IP网络或模数病房门口机的“进入护理”键时，该病房外的门灯常亮青色。
- 病床解除呼叫、护士站解除呼叫、卫生间解除报警时，该病房外的门灯熄灭。

## 附：技术、规格参数

|                      |
|----------------------|
| 工作电压：12V-24V         |
| 最大功耗：0.7W            |
| 控制方式：电平控制            |
| 工作温度：-20℃ ~ +80℃     |
| 工作湿度：10% ~ 90%       |
| 尺寸：86x86x32mm(LxWxH) |

# 产品接线使用说明

产品名称：三色门灯



## 一、引线说明：

将三色门灯上的黄、红、黑三芯引线对应与病房门口机连接：  
与IP网络病房门口机或模数病房门口机的“电源输出、门灯控制、地线”相连。  
与模拟病房门口机的“电源(红线)、门灯(粉线)、地线(黑线)”相连。

## 二、使用说明：

病房外的门灯闪亮方式如下：

- ① 普通呼叫时，该病房外的门灯闪亮红色。
  - ② 高级呼叫时，该病房外的门灯闪亮蓝色。
  - ③ 特护呼叫时，该病房外的门灯闪亮绿色。
  - ④ 输液报警时，该病房外的门灯呈红蓝交替闪亮。
  - ⑤ 卫生间报警时，该病房外的门灯呈红绿交替闪亮。
  - ⑥ 按下IP网络或模数病房门口机的“进入护理”键时，该病房外的门灯常亮青色。
- 病床解除呼叫、护士站解除呼叫、卫生间解除报警时，该病房外的门灯熄灭。

## 附：技术、规格参数

|                      |
|----------------------|
| 工作电压：12V-24V         |
| 最大功耗：0.7W            |
| 控制方式：电平控制            |
| 工作温度：-20℃ ~ +80℃     |
| 工作湿度：10% ~ 90%       |
| 尺寸：86x86x32mm(LxWxH) |