


IP床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



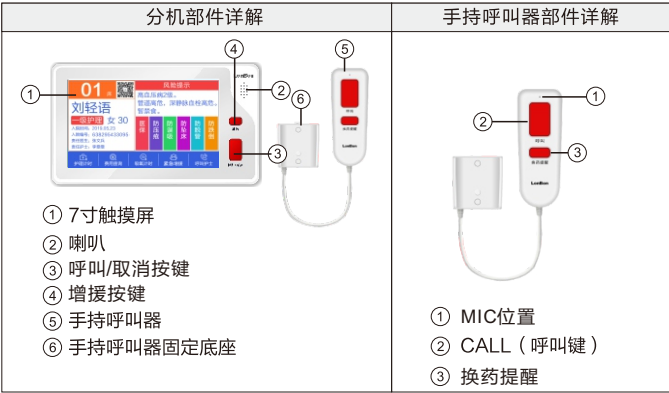


一、安装调试：

1、产品安装图：

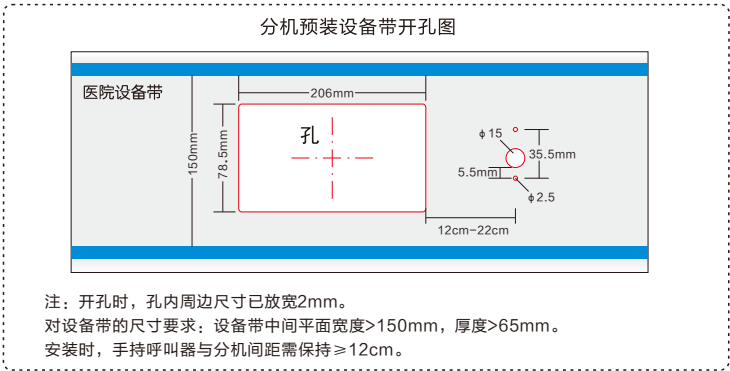

2、背面接口说明：

- (1) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。
- (2) **电源接口：**（+、-）：将-、+分别于另购电源箱的其中1对GND+24V接线柱对应连接，给分机供电（分机供电范围为12V~24V）。
- (3) **外部设备接口：**(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)
- ① 门灯接口插入门灯电源，门灯控制与地线中。
 - ② AN-K端子插入总线电源，扩展总线与地线中。
 - ③ 防水按钮接口（此功能为二选一，无法同时连接）：

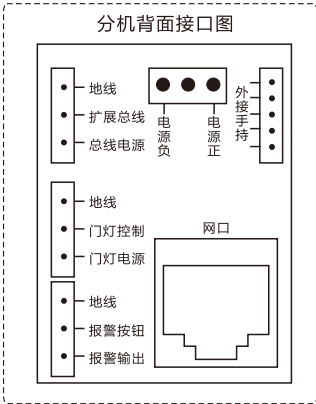

当接ANW4时，将ANW4的红、白、黑分别对应接在报警输出、报警按钮、地线。
当接ANW3时，将ANW3的两芯线分别与报警按钮、地线相接。

二、设置调试：

- 1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 3、输入序列号后4位进入基本设置使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址

例如：

“地址盒IP”：192.168.1.169（输入与主机同一地址盒）

“IP地址”：192.168.1.22

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

- 4、恢复出厂默认值：将恢复成本机出厂时的默认设置。
- 5、安装使用说明：可供查看本机的简要说明。
- 6、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

三、使用说明：

- 分机主界面上有5个功能键：费用查询、吸氧计时、请求增援、呼叫护士站、护理计时。其中，费用查询功能需与HIS连接，在HIS中设置方可使用。
- 1、呼叫功能：按手持呼叫器上的“CALL”键，向主机报警主机接通后可通过手持跟主机通话且呼叫时门灯会闪烁与护理级别对应的颜色，主机接通通话时门灯为常亮状态挂断后门灯熄灭。
 - 2、请求增援：按下界面上的“请求增援”键，主机上相应的路选分机键呈黄色闪亮，并显示：“请求增援”且门灯会蓝绿闪烁接通后门灯熄灭。
 - 3、吸氧计时：吸氧机时进入吸氧界面点击开始进行吸氧，点击暂停吸氧时间达到设定时间会向主机报警，点击结束则不再向主机报警。
 - 4、费用查询：按下界面上的“费用查询”键，可查看费用汇总、费用明细及每日清单。
 - 5、护理计时：点击护理计时后，分机上会出现护理计时时间显示。
 - 6、换药提醒：按下手持上的换药提醒按钮，分机会有换药提醒并向主机呼叫。