


IP门口机

—— 安装调试使用说明 ——




一、安装调试

1、产品安装图：

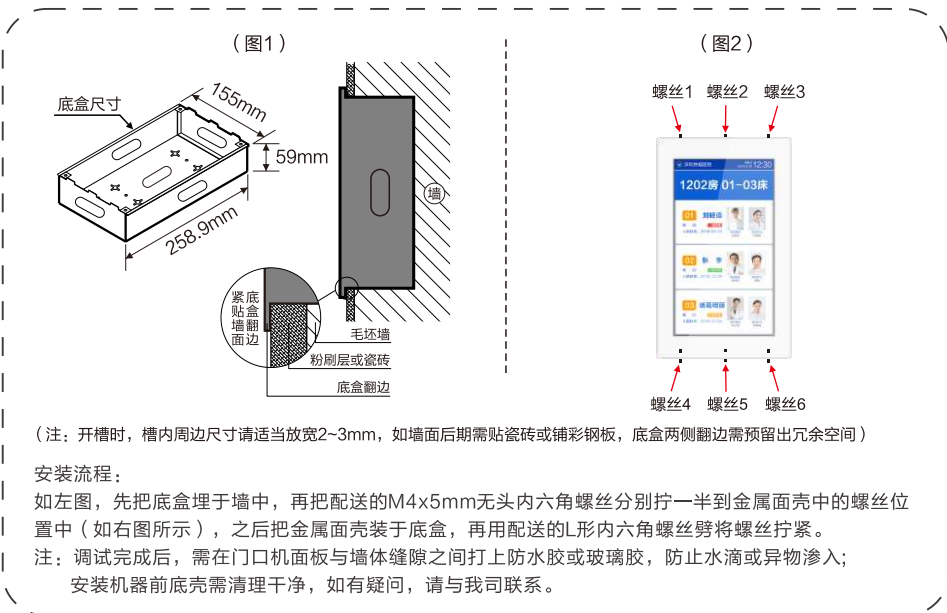

2、背面接口说明：

- (1) **网络接口**：通过网络端口接入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。
- (2) **电源接口**：将14V0.8A电源适配器接到DC12~24V处给设备供电。
- (3) **集中供电接口**：将“+、-”极分别与电源接线箱的“+24V、GND”对应连接，给门口机供电。
- (4) **防水按钮接口**（此功能为二选一，无法同时连接。）：
 - ① 当接ANW4时，将ANW4的红、白、黑分别对应接在报警输出、报警按钮、地线。
 - ② 当接ANW3时，将ANW3的两芯线分别与报警按钮、地线相接。
- (5) **门灯接口**：门灯的黄、红、黑，插在对应的门灯电源、门灯控制、地线上。
- (6) **扩展接口**：将按钮接线盒（AN-K）的电源、信号、地线分别对应接在门口机的总线电源、扩展总线、地线。

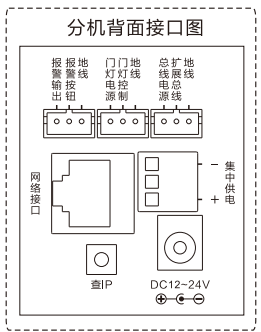

二、设置调试

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

1、将病房门口机插上网络并通电，设备启动中会显示IP（默认为192.168.1.168），待设备启动完毕后，登录该设备的网页(即该设备的IP地址，账号密码默认为admin)进入“基本设置(必填)”界面，设置方法如下：

例如：将病房门口机设置成10号NN主机下的20号病房门口机，依次输入以下信息：

- “本机编号”：010、020 (设备编号不可重复)；
- “地址盒IP”：192.168.1.169 (需和主机输入同一个IP地址)；
- “房间号”：1002(可以自定义房号)；
- “IP地址”：192.168.1.22；
- “子网掩码”：255.255.255.0；
- “网关”：192.168.1.1；

最后点“保存”按钮，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

2、分机编码：

如果门口机需要管理数字病床分机，需要将该数字病床分机由“未分配分机”列表移至“本机分机”列表，点击保存按钮，即可将已添加的病床分机号归到本病房门口机下管理。依此方法，进入每个病房门口机的分机设置页面中，选中需要添加管理的网络病床分机号。

三、使用说明：

- 1、**信息显示**：具有电子床头卡功能，支持显示病房号、床位号、患者信息、责任医生护士的姓名及照片等。
- 2、**标题设置**：支持自定义设置门口机标题名称，各个科室可区分显示。
- 3、**时间同步**：支持与信息交互服务器时间同步，确保时间准确。
- 4、**状态显示**：显示屏可实时显示下属床位分机的呼叫、报警等状态。
- 5、**接口多样**：支持外接门灯、洗手间报警按钮。
- 6、**远程升级**：支持远程在线升级软件，便于维护。