


IP床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



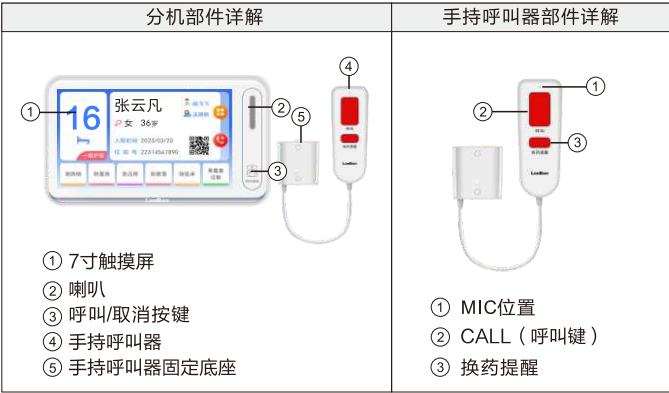

一、安装调试：

1、产品安装图：

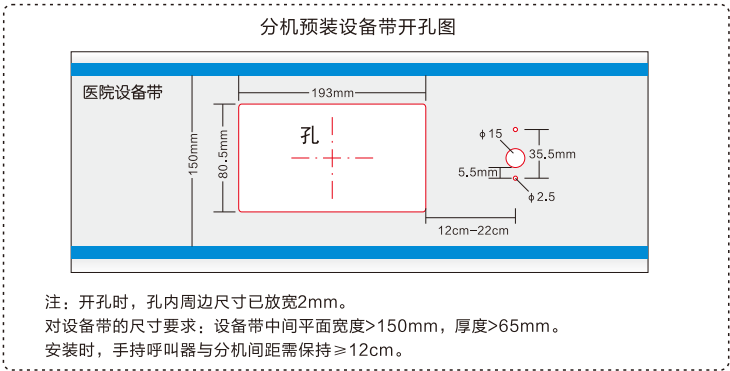


2、背面接口说明：

(1) **网络接口**：将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口(注意方向)，再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) **电源接口**：将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向)，红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接，给分机供电(供电范围12~24V)。

(3) **外部接口**：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)

① **外接门灯(HBW-ME)**：将门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

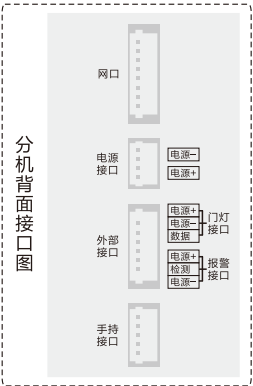

- ② **外接门灯(NBW-ME5)**：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。
- ③ **外接报警按钮(ANW3)**：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。
- ④ **外接报警按钮(ANW4)**：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。

二、设置调试：

- 1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 3、输入序列号后4位进入基本设置使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址

例如：

“服务器IP”：192.168.1.169（输入与主机同一服务器）

“IP地址”：192.168.1.22

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

- 4、恢复出厂默认值：将恢复成本机出厂时的默认设置。
- 5、安装使用说明：可供查看本机的简要说明。
- 6、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

三、使用说明：

- 1、**呼叫护士**：可通过手持呼叫器、或“呼叫护士的”触摸按键向主机发起呼叫请求，主机接听后即可与分机双向对讲。
- 2、**更多应用**：点击后进入更多功能菜单。
- 3、**紧急增援**：级别优先于普通呼叫，按下“紧急增援”键后主机将播报“xx床紧急增援”。
- 4、**护理计时**：第一次点击开始计时、再次点击结束计时，计时过程会存储在主机或服务器端查看，用于护士护理工作的记录。
- 5、**计时提醒**：用于辅助护士日常工作，对吸氧、皮试、输液的时间自定义设置后，到时后通知护士站计时结束。
- 6、**费用查询**：可查询HIS推送的住院费用汇总、费用明细、每日清单。
- 7、**换药提醒**：区别于呼叫护士和紧急增援，患者可通过手持上的“换药提醒”按键，向主机发起换药提醒呼叫。