


体征检测仪

—— 产品安装使用说明 ——



一、安装调试：

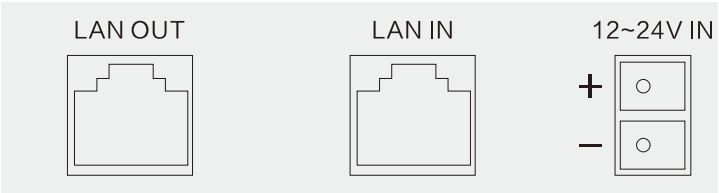

- 1、LAN IN：RJ45网络输入接口。
- 2、LAN OUT：RJ45网络级联输出接口。
- 3、12~24V IN：供电接口，电源供电时使用。（如采用POE供电则不需要单独外接电源）


二、使用说明

1、初次使用：

体征监测仪接入交换机网络后，在浏览器地址栏输入http://192.168.1.168并按回车跳转至设备页面 (192.168.1.168为设备出厂默认IP地址)，在登录框中输入用户名和密码(默认用户名:admin密码:admin)，点击确定，即进入设备的“系统信息”界面。



在“基本设置”界面中的设备信息栏设置本机编号(1-999,不可重复)、分组名称、物联网服务器IP。网络信息栏可修改本机网络相关配置，点击保存后生效。

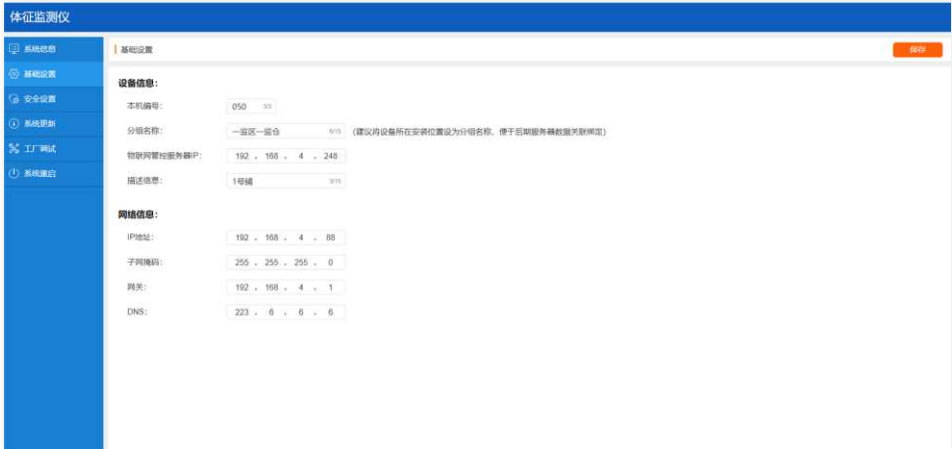

2、恢复出厂设置：

长按设备面板上的RST键6秒以上，指示灯熄灭，即可恢复出厂设置。出厂设置下，设备IP为192.168.1.168，用户名和密码均为admin。（此功能需要在技术指导下使用）

3、系统重启：

点击系统重启按钮，系统将会重新启动。

三、安装注意事项

- 1、请确保连接设备的网线没有损坏，RJ45接头(水晶头)连接牢固。
- 2、由于设备出厂默认的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中。
- 3、设备的编号不可相同，否则会导致部分设备工作异常。
- 4、设备安装高度是雷达中心点距离床铺铺面1.2米